

E J E M P L O PROTOCOLO

SOLUCIÓN REGENESIS - CORPORAL

Objetivo:

Corrige las imperfecciones del cuerpo restaurando la elasticidad de la piel. Tratamiento para estrías y cicatrices de los senos y el cuerpo, reduciendo su apariencia y tamaño.

Zonas a tratar:

Senos (Con electrodos redondos con disco adhesivo).
Senos grandes y Cuerpo (Electrodos rectangulares).

Componentes del tratamiento:



AFFINITY MILK




AFFINITY TONIC



REGENESIS GEL



GENERADOR
SUNTRONIC

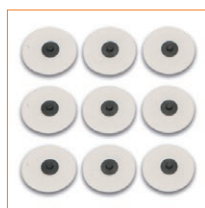

ELECTRODOS
REDONDOS



ELECTRODOS
RECTANGULARES



REGENESIS
EMULSION



ElectroBeautyBody
HYDRASILK



ElectroDerma SUN
HP




ElectroDerma SUN
MP



Tratamiento medio

6 a 10 sesiones.

2 por semana con al menos 2 días de diferencia.

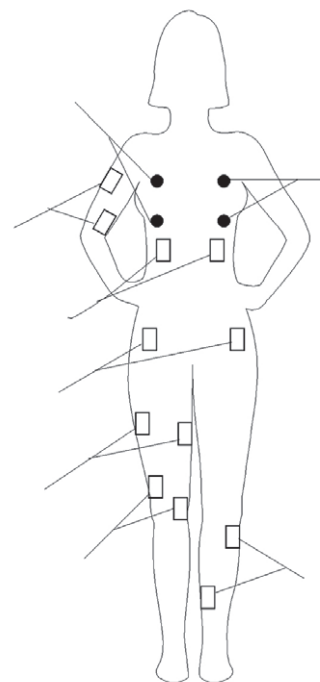

PROTOCOLO PROFESIONAL

Producto utilizado	Secuencia de aplicación
AFFINITY MILK	Antes de cada aplicación para limpiar la piel.
AFFINITY TONIC	Para eliminar los residuos de AFFINITY MILK.
REGENESIS GEL	Capa delgada pero uniforme en toda la parte a tratar.
ELECTRODOS REDONDOS	Aplicar los electrodos de acuerdo con el diagrama. Para senos pequeños, electrodos redondos fijados con adhesivos.
ELECTRODOS RECTANGULARES	Aplicar los electrodos de acuerdo con el diagrama. Para senos grandes, en los brazos, en el abdomen, las caderas, las nalgas, los muslos y las piernas, aplique los electrodos rectangulares previamente humedecidos y fíjelos con las bandas azules suministradas. Los electrodos conectados al mismo cable deben tener una distancia mínima de 5 cm y no deben tocarse.
Generador AS 43 SUNTRONIC Programa: TONIC	Selección tiempo: llevar a cabo un ciclo de 20 minutos + un ciclo de 35 minutos para los primeros 6 tratamientos. Para tratamientos posteriores, la función Tonic es suficiente durante 35 minutos.
REGENESIS EMULSION	Aplicar al final del tratamiento. Evitar ducha/baño en las 2 horas siguientes.

PROTOCOLO HOME

Productos específicos	Aplicación / Función
ElectroBeautyBody HYDRASILK	Aplicar sobre el cuerpo después del baño, la ducha y la exposición al sol. Emulsión para el cuerpo a base de sustancias con una alta actividad bioquímica cutánea para la hidratación superficial y la restauración de las actividades normales de las estructuras epidérmicas y dérmicas. Reestructuración y elasticidad, deja la piel suave e hidratada.
ElectroDerma Sun MP	Protege la piel (protección media). Aplicar antes de la exposición al sol y repetir la aplicación más veces a lo largo de la exposición. Se sugiere el uso de E.Derma Sun MP después de haber obtenido un poco de bronceado. USO EXTERNO. Emulsión solar de media protección que contiene filtros anti UVA y anti UVB, con factores biotecnológicos que favorecen la producción fisiológica de melanina.
ElectroDerma Sun HP	Protege la piel (protección alta). Aplicar sobre la piel antes de la exposición al sol. Repetir la aplicación durante la exposición. USO EXTERNO. Emulsión solar con alta protección que contiene filtros anti UVA y anti UVB, con factores biotecnológicos que favorecen la producción fisiológica de melanina.

*Más información de los 10 PROTOCOLOS a info@suntronicmethod.com